


Désinfection d'une sonde d'échographie endovaginale

AFFICHE DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ



AVANT L'EXAMEN

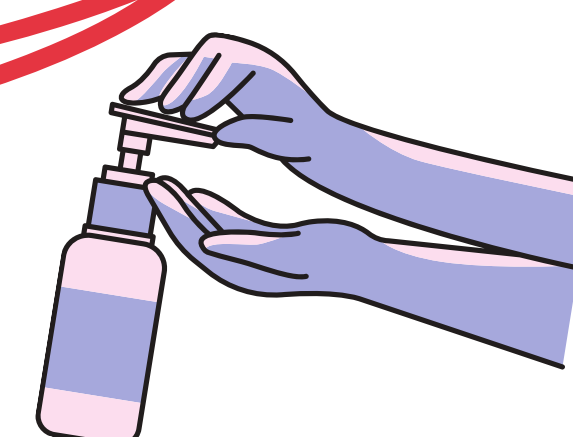

✓ **Hygiène des mains** : friction hydro-alcoolique (FHA*)

- Zero bijou
- manches courtes
- zero vernis
- ongles courts

✓ Port de **gants non stériles**



✓ Utiliser une **gaine de protection CE** adaptée à la sonde

✓ **Gel unidose stérile**



APRÈS L'EXAMEN DE CHAQUE PATIENTE

- 1 Retirer la gaine → **jeter** immédiatement
- 2 **Essuyer le gel** avec un support non abrasif **PUIS**
- 3 **Désinfecter sonde + poignée** (désinfection de niveau intermédiaire) :





les méthodes ici

- **Lingette** désinfectante conforme normes EN
- Ou **Immersion** dans produit adapté (ex. acide peracétique)
- Ou Procédé **automatisé** (Antigermix®, Trophon®, etc.)

- 4 **Inform**er la patiente

plaquette sur le risque infectieux

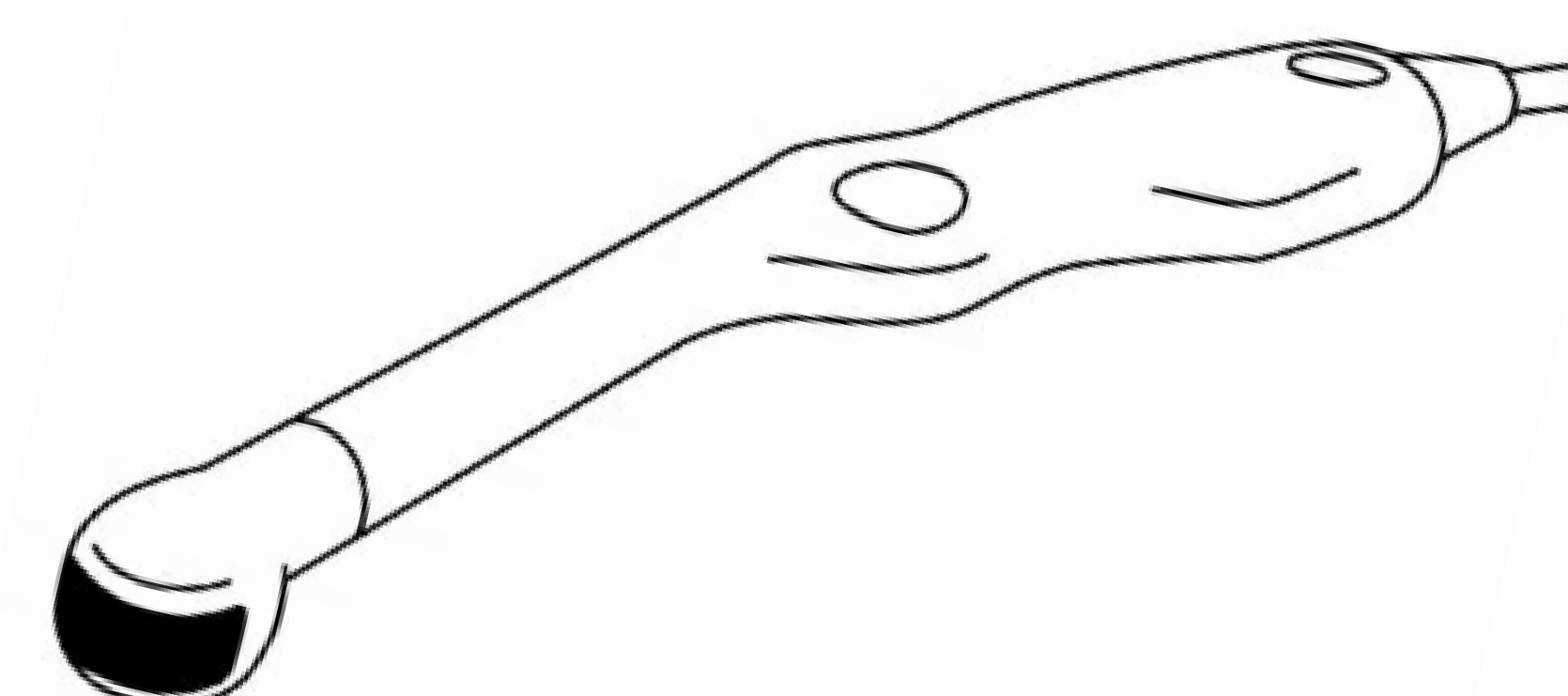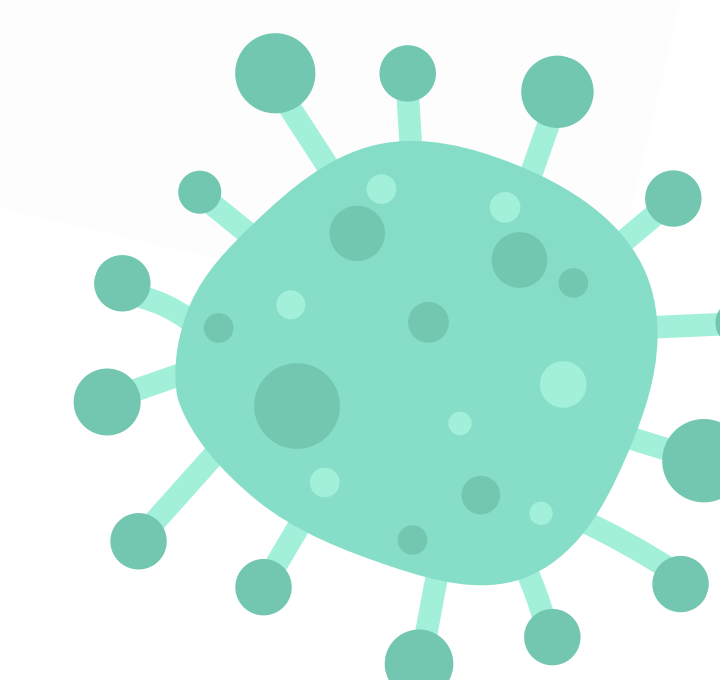

EN FIN DE JOURNÉE

entretien approfondi du matériel de soin et de l'environnement




Attention les pratiques suivantes ne sont pas recommandées

lors de l'utilisation des sondes endovaginales

- ✗ **Flacon multidose** → uniquement pour l'utilisation des sondes abdominales
- ✗ **Préservatif** → protection insuffisante



l'intégralité des recommandations de la SF2H

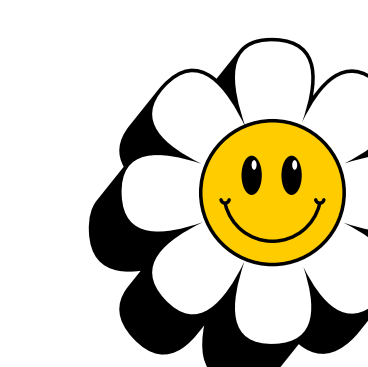

Par ici

